

ENTSCHEIDEND BESSER



Venta


Sicherheit und Komfort neu definiert



Venta – Die perfekte Verbindung von Sicherheit und Komfort

Ein modernes Bett für die stationäre Pflege muss hohe, sehr unterschiedliche Anforderungen erfüllen. Besonders wichtig ist die Entlastung der Pflegekräfte: Auch in Zeitnot und angespannten Situationen sollte sich das Bett mühelos und ergonomisch bedienen lassen. Zugleich erwartet der Bewohner Komfort und Sicherheit ohne freiheitsentziehende Maßnahmen. Die innovative Technik für diese Ansprüche darf nicht die wohnliche Optik des Bettes beeinträchtigen, denn in einer privaten, ansprechenden Umgebung fühlen sich alle Beteiligten viel wohler.

Mit unserem Venta haben wir Antworten auf diese Fragen gefunden und dabei ein Pflegebett aus einem Guss geschaffen. Als Niedrigbett mit einer flexiblen Seitensicherung schützt und mobilisiert das Venta den Bewohner zugleich. Der optionale LCD-Handscher mit EasyCare-Funktion ermöglicht allen Nutzergruppen eine schnelle und einfache Bedienung. Und auch optisch ist das Venta mit seinem eleganten Erscheinungsbild und den wählbaren Softcovern ein wohnliches Designerbett für jeden Einrichtungsstil.

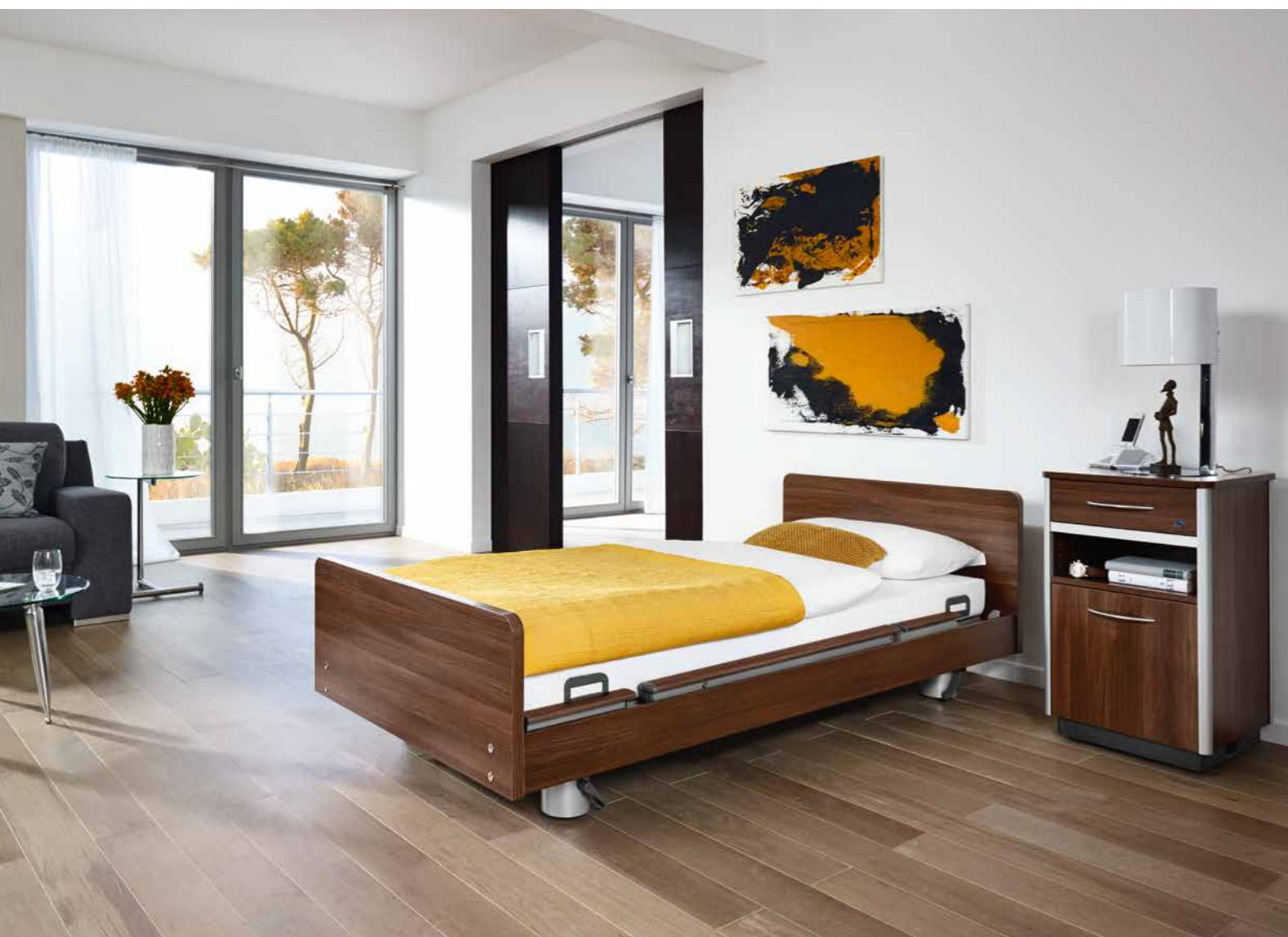

Inhalt

3 Modellvarianten	14 Steckbeschlag-Häupter	24 e-help
4 Venta – Standard	15 Häupter und Dekore	25 24-Volt-System
6 Venta – Variante movo	16 Untergestell	26 Zubehör
7 Venta – Variante forto	17 Liegeflächen, Bremsen	28 Ausstattung und Optionen
8 Seitensicherung	18 Bettverlängerung	30 Die Stieglmeyer-Gruppe
10 Teleskopierbare Seitensicherungen	20 3-Stopp-Funktion	
12 Softcover	22 Innovatives Bedienkonzept	

Komfort



Venta – Standard

- **Höhenverstellung:**
25 – 80 cm
- **Niedrigbett**
- **Ergonomische Arbeitshöhe:**
Entlastung der Pflegekraft durch rücken-schonendes Arbeiten auf Hüfthöhe
- **schwenkbare Seitensicherungen mit 42 cm Schutzhöhe**

Seite 4

Mobilität



Venta – Variante movo

- **Höhenverstellung:**
28 – 83 cm
- **Niedrigbett**
- **Rollen:**
100-mm-Doppelaufrollen für hervorragende Manövrierfähigkeit

Seite 6

Schwerlast



Venta – Variante forto

- **Höhenverstellung:**
37 – 81 cm
- **Sichere Arbeitslast:**
260 kg für schwergewichtige Bewohner
- **Liegeflächenbreite:**
100 cm
- **Rollen:**
125-mm-Laufrollen mit 32 mm Breite

Seite 7

Venta – Standard


Das wohnliche Niedrigbett

Pflegeheime müssen ihre Bewohner vor Sturzverletzungen schützen, ohne die Mobilität unnötig einzuschränken. Denn freiheitsentziehende Maßnahmen (FEM) senken die Lebensqualität der Pflegebedürftigen erheblich, beeinträchtigen die psychische und physische Gesundheit und sind rechtlich mit hohen Hürden verbunden.

Unser Venta hilft dabei, **FEM zu vermeiden**. Als Niedrigbett mit einer bodennahen Tiefposition reduziert es das Risiko von Sturzverletzungen. Möchte der Bewohner aufstehen, kann er mithilfe des Handschalters und der 3-Stopp-Funktion automatisch die ergonomisch günstige Höhe von ca. 38 cm einstellen. Die innovative Seitensicherung bietet **normgerechten Schutz** und lässt zugleich die untere Betthälfte für einen ungehinderten Ein- und Ausstieg frei.

- großer Höhenverstellbereich von ca. 25 - 80 cm ermöglicht rückschonende Pflege
- Seitensicherung einhändig bedienbar
- moderne Handschalter für intuitive Steuerung zur Auswahl
- große Auswahl wohnlicher Häupterformen und Dekore
- textile Softcover ermöglichen Anpassung an jeden Geschmack

Außenmaße/Höhenverstellbereich:

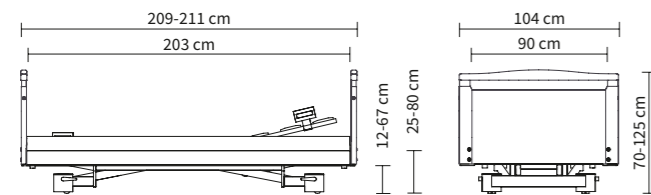

Das Venta entlastet die Pflegekräfte, fördert die Mobilität der Bewohner und überzeugt mit einer wohnlichen Optik. Design-Elemente wie die optionalen Softcover sorgen für eine wohnliche, private Atmosphäre.





Venta – Variante movo


Besonders gut fahrbar für einen lebendigen Alltag

Niedrigbett

Die Variante movo des Venta zeichnet sich durch eine besonders **gute Fahrbarkeit** aus. Bettlägerige Bewohner können dadurch leichter am täglichen Leben in den Gemeinschaftsräumen oder auf der Terrasse teilhaben und gewinnen neue Lebensfreude. Die Pflegekraft wird durch das **einfachere Manövrieren** z. B. in Mehrbettzimmern oder schmalen Fluren entlastet, zugleich sinkt das Risiko von Schäden durch Kollisionen.

- 100-mm-Doppelaufrollen mit sehr guten Fahreigenschaften
- Rollenzentralfeststellung serienmäßig
- großer Höhenverstellbereich von 28 - 83 cm

Außenmaße/Höhenverstellbereich:

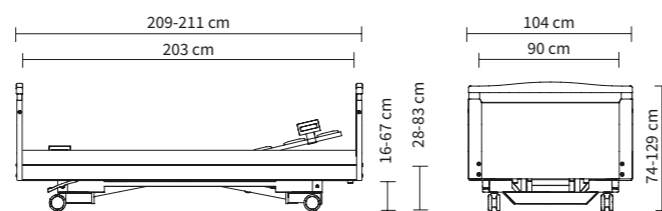

Venta – Variante forto


Komfort für schwergewichtige Bewohner


Schwerlastbett

Die Zahl übergewichtiger Menschen hat sich in vielen Industriestaaten in den vergangenen 40 Jahren verdoppelt. Auch von Adipositas sind immer mehr Menschen betroffen. Diese Entwicklung wird sich in der Pflege bemerkbar machen. Die Variante forto des Venta punktet als **Schwerlastbett** mit Platz, Komfort und Sicherheit. Mit dieser Modellvariante ist Ihr Haus auf viele Herausforderungen gut vorbereitet.

- hohe sichere Arbeitslast von 260 kg
- Liegeflächenbreite von 100 cm serienmäßig
- belastbare 125-mm-Laufrollen
- Höhenverstellung von 37 - 81 cm für bequemen Ausstieg und ergonomische Pflege
- komfortable Sitzposition

Außenmaße/Höhenverstellbereich:

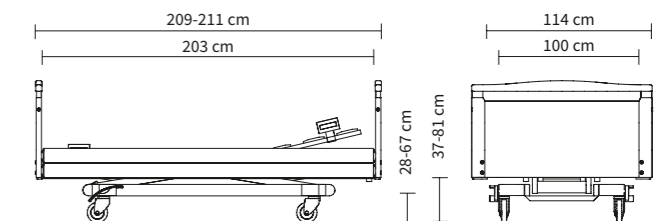

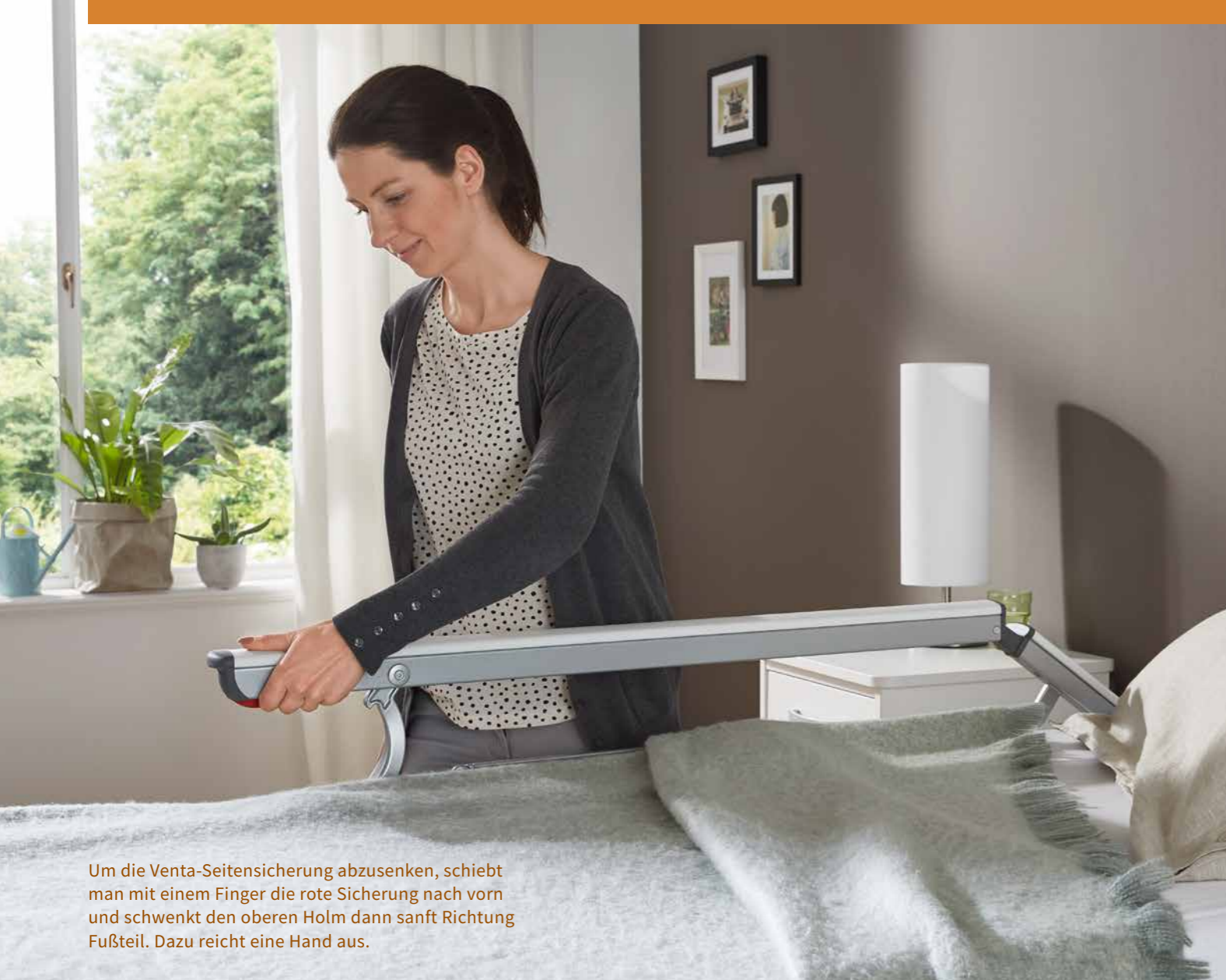

Um die Venta-Seitensicherung abzusenken, schiebt man mit einem Finger die rote Sicherung nach vorn und schwenkt den oberen Holm dann sanft Richtung Fußteil. Dazu reicht eine Hand aus.

Seitensicherung

Schutz und Mobilität in jeder Situation

Die innovative Seitensicherung zählt zu den stärksten Vorteilen des Venta. Die stabile und zugleich filigrane Konstruktion deckt 50 % der Liegeflächenlänge ab und bietet dadurch Schutz nach den Vorschriften der **Norm 60601-2-52**, ohne das Verlassen des Bettes über die fußseitige Hälfte zu verhindern. So vermeidet die Seitensicherung FEM und hilft, die Philosophie des **Werden-felser Weges** umzusetzen und die Mobilität der Bewohner zu erhalten.



- freier Durchblick zwischen den Holmen
- elegante, dezente Form
- Handlauf wird im abgesenkten Zustand zur angenehmen Sitzfläche an der Bettkante

Ein optionales Füllstück schließt im abgesenkten Zustand die Lücke zwischen Handlauf und Fußende des Bettes.

Mit einem optionalen Hebel unterhalb der Seitenblende lässt sich die abgesenkte Seitensicherung arretieren. Dadurch wird ihr unbeabsichtigtes Anstellen während der Pflege oder in hektischen Situationen verhindert. Die Arretierhebel sind beidseitig montiert.



Einhand-
bedienung

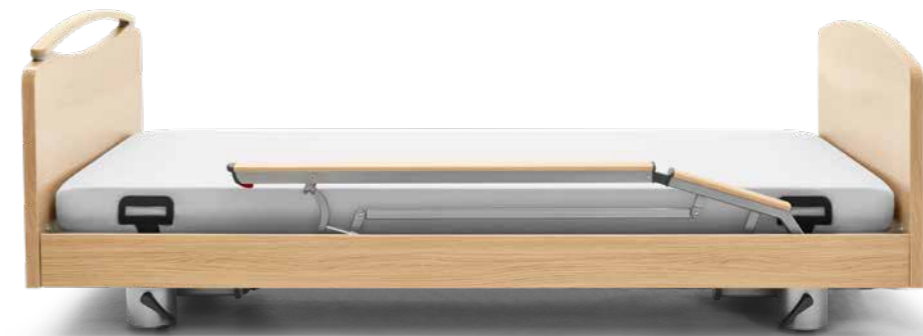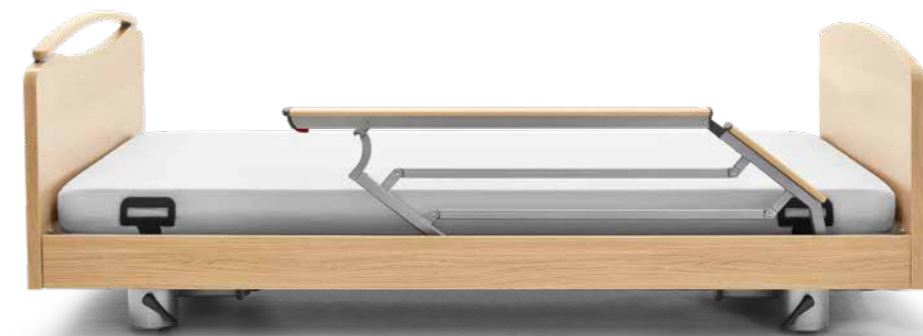

ENTSCHEIDEND BESSER

Einfache Bedienung mit einer Hand

Die leichte Bedienung der Venta-Seitensicherung mit nur einer Hand hilft der Pflegekraft in angespannten Situationen. Um eines der Elemente abzusenken, muss man nur mit einem Finger die rote Sicherung nach vorn schieben und gleichzeitig mit sanftem Druck den oberen Holm Richtung Fußende schwenken. Zum Anstellen der Seitensicherung genügt ein kurzer Schwung, danach richtet sie sich gedämpft von allein auf und rastet sicher ein. Steht die Pflegekraft am Fußende des Bettes, kann sie mit beiden Händen das rechte und linke Element **gleichzeitig aufrichten** und spart Zeit.



Teleskopierbare Seitensicherungen

Flexibler Schutz für jede Anforderung

Ist ein pflegebedürftiger Mensch z. B. durch eine Demenz stark sturzgefährdet, kann ein **umfassender Schutz unverzichtbar** sein. In diesem Fall empfiehlt sich die optionale teleskopierbare Variante der Venta-Seitensicherung. Auch sie deckt im Normalzustand nur 50 % der Liegefläche ab, doch bei Bedarf lassen sich die Holme nahezu über die gesamte Länge der Liegefläche ausziehen und rasten am Ende sicher ein. Die letzte kleine Lücke am Fußende kann bei Bedarf mit einem **Füllstück** geschlossen werden, das als Zubehör lieferbar ist.

Auch die teleskopierbare Seitensicherung entlastet die Pflegekräfte durch eine mühelose **Einhand-Bedienung**. Zusätzlich überzeugt diese Variante durch ihre Flexibilität. Benötigt ein Bewohner je nach Tagesform unterschiedlichen Schutz oder soll das Bett wechselnden Bewohnern zur Verfügung stehen, passt sich die teleskopierbare Seitensicherung allen Bedürfnissen an. Das vereinfacht die logistischen Abläufe in der Einrichtung und spart Zeit und Kosten.



Wird die Teleskop-Verlängerung nicht ausgezogen, ermöglicht die Seitensicherung einen freien Ein- und Ausstieg.



▲ Die teleskopierbare Seitensicherung passt sich flexibel an wechselnde Schutzbedürfnisse der Bewohner an.



ENTSCHEIDEND BESSER Ergänzungsstück für lückenlosen Schutz

Die teleskopierbare Venta-Seitensicherung deckt nahezu die komplette Längsseite des Bettes ab. Nur am Fußende lässt sie einen schmalen Bereich offen. Soll auch dieser für lückenlosen Schutz geschlossen werden, ist ein optionales Ergänzungsstück als Zubehör erhältlich. Das Füllstück bleibt immer fest an seiner Position und bietet mit seiner Griffleiste zusätzlichen Halt, wenn der Bewohner z. B. neben dem Bett steht. Die gesamte Seitensicherung ermöglicht mit ihrer filigranen Konstruktion einen freien Blick in den Raum oder aus dem Fenster.



Die Kombination aus blauen Softcovern und dem weißen Dekor Kreide sorgt für eine frische, positive Atmosphäre.

▲ Softcover für die Häupter sind in einem Kissendesign (links) oder einem Kederdesign (rechts) erhältlich.

Softcover

Mehr Farbe und Eleganz

Farbe weckt Energie und positive Emotionen. Bei alten und demenzkranken Menschen kann sie die kognitiven Fähigkeiten und das **Orientierungsvermögen** unterstützen. Mit den optionalen Softcovern für die Häupter und Seitenblenden verwandelt sich das Venta in ein wohnliches **Designerbett**, das sich in jede Raumeinrichtung einfügt und dem Bewohner ein Gefühl von Geborgenheit und Identifikation mit seinem Zimmer vermittelt.

- 2 Formen zur Auswahl: Kissendesign mit spitzen Ecken, Kederdesign mit runden Ecken
- hochwertiger Stoff mit attraktiven Farben und Mustern
- Softcover für Häupter und Seitenblenden einzeln erhältlich und frei kombinierbar
- müheloses Anbringen und Abnehmen
- ideal für die Umsetzung von Farbkonzepten in Räumen oder Stationen



▲ Gedeckte Töne stehen ebenso zur Auswahl wie leuchtende Farben.



▲ Die Softcover lassen sich in wenigen Augenblicken über die Häupter ziehen und wieder abnehmen.

Flecken können zumeist mit der Bürste entfernt werden.



ENTSCHEIDEND BESSER Einfache Reinigung



Wenn pflegebedürftige Menschen einen Großteil des Tages im Bett verbringen und dort auch ihre Mahlzeiten einnehmen, kann es zu Verschmutzungen durch Flüssigkeiten oder Lebensmittel kommen. Der hochwertige Stoff unserer Softcover ist darauf vorbereitet. Flüssige und viskose Substanzen dringen nicht in das Gewebe ein. Sie können mit einer Bürste, Wasser und Reinigungsmitteln schnell und gründlich entfernt werden. Eine Reinigung in der Waschmaschine ist nicht möglich.



Entnehmbare Häupter

Fuß- und Haarpflege im Bett bereiten erheblich weniger Mühe, wenn die Pflegekraft direkt am Fuß- oder Kopfende arbeiten kann. Auch in einem medizinischen Notfall ist der **Zugang zum Bewohner** von allen Seiten hilfreich. Daher sind für das Venta optional entnehmbare Häupter erhältlich. Sie lassen sich **werkzeuglos** hochziehen und ebenso schnell wieder auf ihre Befestigungen schieben.



▲ Bei Bedarf lassen sich Kopf- und Fußteil mit geringem Kraftaufwand hochziehen und abnehmen.

▲ Ebenso einfach lassen sich die Führungen der Häupter zurück auf ihre Befestigungen schieben.



▲ Mit attraktiven Dekoren lassen sich die Häupter an den persönlichen Geschmack anpassen.



▲ Das niedrige Fußteil Nobla reha ermöglicht einen freien Blick in den Raum oder aus dem Fenster.

Häupter und Dekore

Wohnlichkeit für jeden Einrichtungsstil

Die Wohnlichkeit und das individuelle Design des Venta spiegeln sich auch in zahlreichen wählbaren Häupterformen und Holzdekoren wider. Von sachlicher Geradlinigkeit bis zu spielerischen Rundungen ist **jeder Stil** vorhanden. Häupter mit **Griffleisten** erleichtern zusätzlich das Manövrieren des Bettes und geben dem Bewohner im Stehen sicheren Halt. Die Spanne der Dekore reicht vom weißen Ton Kreide bis zum opulenten dunkelbraunen Bella Noce Schoko.

Weitere Informationen in unserem Prospekt „Häupter und Dekore“

Häupter für Softcover geeignet



Teno



Nobla



Nobla reha

Weitere Häupter



Alero



Camo



Lito / Lito reha



Pino



Podego





Die optionale Abdeckung passt sich der Dekorfarbe des Bettes an.

Untergestell mit harmonischer Linienführung

Zur Wohnlichkeit des Venta trägt neben dem individuellen Holzbau und den Softcovern auch das Untergestell bei. Die Enden seiner Längsverstrebungen werden standardmäßig mit **4 einzelnen Kunststoffabdeckungen** umkleidet. In ihrer silbergrauen Farbe passen sie genau zum Ton des Gestells. Die Abdeckungen ummanteln einige mechanische Merkmale und sorgen dadurch für eine harmonischere Linienführung des Bettes. Zugleich lässt sich die glattere Oberfläche noch einfacher und **gründlicher reinigen**. Bei Bedarf können die Kunststoffeilemente werkzeuglos abgenommen werden.

Auf Wunsch ist eine noch **umfassendere Abdeckung** erhältlich. Ihre beiden Kunststoff-Elemente umkleiden die kompletten Stirnseiten des Untergestells und sind in den Farben mehrerer **Holzdekore** lieferbar. Wer nur das Kopf- oder das Fußteil ummanteln möchte, kann auch ein einzelnes Element erwerben. Die Dekorabdeckung verbirgt die technischen Aspekte des Pflegebettes und verleiht ihm ein besonders privates Aussehen. Auch sie lässt sich leicht reinigen und abnehmen.



▲ Serienmäßig umkleiden 4 Kunststoffabdeckungen die Enden der Längsverstrebungen.

ENTSCHEIDEND BESSER

Attraktive Farben zur Auswahl

	Lindberg Eiche
	Eiche Style Zimt
	Havana Kirsche
	Buche Natur
	Kreide
	Silbergrau

Liegeflächen

Die Grundlage für erholsamen Schlaf

Eine optimale Liegefläche unterstützt die Wirkung der Matratze und trägt zu den guten Hygiene-Eigenschaften des Pflegebettes bei. Die serienmäßige **Hygiene-Liegefläche** des Venta ermöglicht eine besonders leichte und gründliche Aufbereitung. Tiefgezogene Lüftungsschlitze im Polypropylen fördern ein gesundes Mikroklima im Bett und einen wohltuenden Schlaf. Alle Arten von Spezialmatratzen können zumeist ohne Unterlegematratzen aufgelegt werden, sodass die **Schutzhöhe** der Seitensicherung ausreicht.

Für besonders erholsamen Schlaf und eine ideale Anpassung an die Körperform steht die wählbare **Komfort-Liegefläche**. Sie besteht aus 30 flexibel gelagerten Flächenelementen mit 80 Schwenkfedern und unterschiedlichen Härtegraden. Die Komfort-Liegefläche verstärkt die **druckentlastenden Funktionen** der Matratze. Sie ist etwas höher als herkömmliche Modelle, daher sollten Sie überprüfen, ob die Schutzhöhe der Seitensicherung in Kombination mit Ihrer Matratze ausreicht.

Besonders
leichte
Reinigung

▼ Die Lüftungsschlitze der Hygiene-Liegefläche tragen zu einem gesunden Mikroklima im Bett bei.



▼ Die Komfort-Liegefläche



Bremsen – einfach und sicher

Die guten Fahr- und Manöviereigenschaften des Venta werden durch seine **mühe los bedienbaren Bremsen** noch verstärkt. Die Pflegekraft erreicht die Bremstritte mit dem Fuß selbst dann ohne Probleme, wenn sich die Liegefläche in der tiefsten Position befindet. Bücken und langwieriges Suchen in hektischen Situationen gehören der Vergangenheit an.

Das Venta besitzt serienmäßig eine paarweise **Rollenfeststellung**. Optional ist eine noch komfortablere Rollenzentralfeststellung erhältlich. Bei den Modellvarianten movo und forto ist letztere bereits standardmäßig enthalten. Gerade die besonders mobile Variante Venta movo ist dadurch jederzeit sofort startbereit und kann an der Zielposition mit **nur einer Fußbewegung** sicher gebremst werden.

▼ Bei der Modellvariante movo ist die Rollenzentralfeststellung serienmäßig enthalten.

▼ Auch bei der Modellvariante forto lassen sich alle 4 Rollen mit nur einer Fußbewegung bremsen oder lösen.



▲ Jederzeit leicht erreichbar: die Bremstritte des Venta in der Standardausführung mit paarweiser Rollenfeststellung.

▼ Optional ist das Venta auch mit einer praktischen Rollenzentralfeststellung lieferbar.





Bettverlängerung

Platz und Komfort für große Bewohner

Ausreichender Platz im Pflegebett ist eine entscheidende Voraussetzung für Wohlbefinden. Große Bewohner werden daher die **integrierte Verlängerung** des Bettrahmens um 20 cm schätzen, die jedes Venta standardmäßig besitzt. Pflegekräfte oder Techniker können diese Verlängerung losgelöst von der Seitensicherung ausziehen. Die dabei entstehende Lücke zwischen Seitenblende und Fußteil beeinträchtigt nicht die normgerechte Funktionsfähigkeit des Bettes. Natürlich sind als Zubehör teleskopierbare Seitenblenden lieferbar, die für eine durchgehende elegante Optik sorgen.

Um auch die Liegefläche zu verlängern, gibt es zwei Möglichkeiten. Die einfachere Variante ist ein **Polsterteil**, das mithilfe einer Halterung in den Bettrahmen eingelegt wird und bei Verstellungen der Liegefläche fest an seiner Position bleibt. Soll der Bewohner hingegen in den Genuss der gesundheitsfördernden Beinhochlage kommen, empfiehlt sich die **Unterschenkelhennenverlängerung**. Sie lässt sich einfach und werkzeuglos an der Liegefläche befestigen. Ein passendes Polsterteil kann entweder am Fußende oder – zur Vermeidung von Dekubitus an den Fersen durch die Nahtstelle – am Kopfende platziert werden. Auch die Verwendung einer 220 cm langen Matratze ist möglich.

- ▲ Die optionalen teleskopierbaren Seitenblenden lassen sich bei Nutzung der Bettverlängerung mit ausziehen.

ENTSCHEIDEND BESSER

Die Bettverlängerung

- Jede Venta-Variante ist mit einer Verlängerung des Bettrahmens von 20 cm ausgestattet.
- Die Verlängerung lässt sich werkzeuglos ausziehen und ohne weitere Umbauten normgerecht nutzen.
- Optionale teleskopierbare Seitenblenden schließen die optische Lücke am Fußende.
- Die Liegefläche lässt sich mit einem Polsterteil verlängern, das am Fußende eingelegt wird und sich bei Verstellungen nicht mitbewegt.
- Alternativ ist eine Unterschenkelhennenverlängerung erhältlich, die sich mitbewegt und so z. B. die orthopädische Position ermöglicht.



Der Bettrahmen ist serienmäßig um 20 cm ausziehbar. Die Liegefläche lässt sich optional mit einem Polsterteil (oben) oder einem Verlängerungsstück für die Unterschenkelhenne (unten) verlängern.

- ▼ Um die Verlängerung des Bettrahmens zu aktivieren, löst die Pflegekraft zunächst den Rastbolzen aus.



- ▼ Danach lässt sich die Verlängerung mühelos ausziehen.



- ◀ Die optionale innovative Unterschenkelhennenverlängerung bewegt sich beim Anstellen der Unterschenkelhenne mit. So werden neben dem Bettrahmen auch die beweglichen Liegeflächen-elemente wirksam verlängert.



Auf der bodennahen Tiefstposition ist der Bewohner ohne freiheitsentziehende Maßnahmen vor Sturzverletzungen geschützt.

3-Stopp-Funktion

Ergonomisch arbeiten und mobilisieren


Je nach Tageszeit und Tätigkeit sollte ein modernes Pflegebett sehr **unterschiedliche Höhenpositionen** einnehmen können. Nachts schützt die bodennahe Tiefstposition vor Sturzverletzungen, zum Aufstehen oder Hinlegen ist eine mittlere Höhe optimal, und die Pflegekraft schont ihren Rücken, wenn die Liegefläche auf Hüfthöhe hochgefahren wird. Mit dem großen Höhenverstellbereich des Venta von ca. 25 - 80 cm lässt sich jede Wunschhöhe stufenlos per Handschalter ansteuern. Für zusätzlichen Komfort sorgt die 3-Stopp-Funktion: Das Bett hält nicht nur automatisch auf der Höchst- und Tiefstposition, sondern legt auch bei ca. 38 cm einen **Zwischenstopp** ein.

- müheloses Ansteuern der ergonomisch vorteilhaftesten Ein- und Ausstiegsposition
- einfachere Mobilisierung der Bewohner
- Höhe des Zwischenstopps lässt sich für sehr kleine oder sehr große Bewohner individuell anpassen

◀ Der automatische Zwischenstopp bei ca. 38 cm eignet sich optimal für den bequemen Ein- und Ausstieg. Die Seitensicherung lässt genug Platz frei und dient als Mobilisierungsstütze.



▲ Die maximale Höhe von 80 cm ermöglicht auch großen Pflegekräften ein rückschonendes Arbeiten in gerader Körperhaltung.

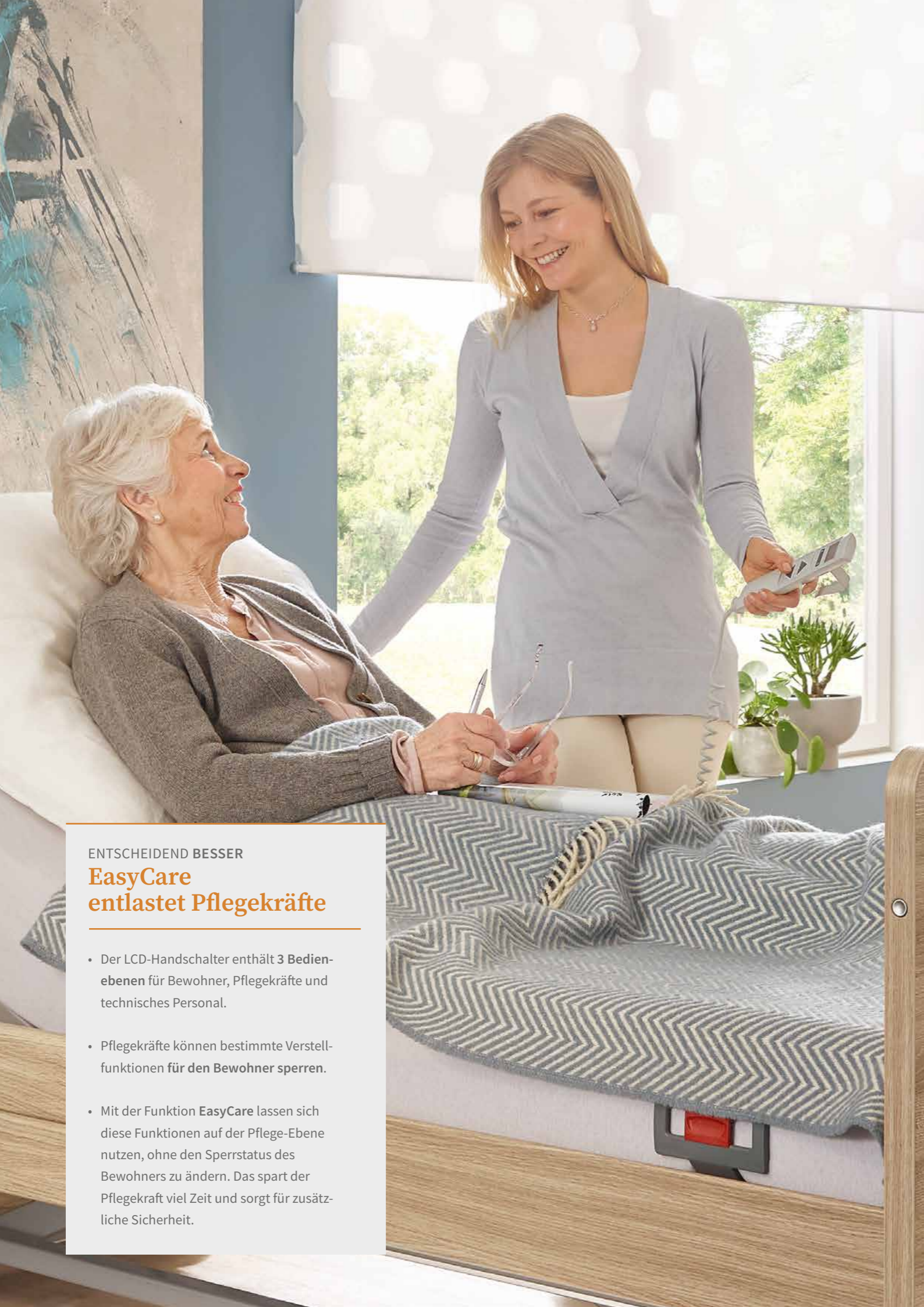

ENTSCHEIDEND BESSER

EasyCare entlastet Pflegekräfte

- Der LCD-Handscharter enthält 3 Bedienebenen für Bewohner, Pflegekräfte und technisches Personal.
- Pflegekräfte können bestimmte Verstellfunktionen für den Bewohner sperren.
- Mit der Funktion EasyCare lassen sich diese Funktionen auf der Pflege-Ebene nutzen, ohne den Sperrstatus des Bewohners zu ändern. Das spart der Pflegekraft viel Zeit und sorgt für zusätzliche Sicherheit.



Der LCD-Handscharter ermöglicht allen Nutzern des Bettes eine optimale Bedienung mit nur 3 Tasten und einem beleuchteten Display.



▲ Der serienmäßige Handscharter zeigt die Verstellfunktionen mithilfe intuitiver Piktogramme.

Innovatives Bedienkonzept

Handscharter für individuelle Anforderungen

Die Bedienung des Venta erfolgt mit einem individuell wählbaren Handscharter. Die komfortabelste Variante ist der optionale LCD-Handscharter mit nur 3 Tasten, EasyCare und einem beleuchteten Display. Er bietet 3 Bedienebenen für Bewohner, Pflegekräfte und technisches Personal, die sich mithilfe eines Entsperrmagneten am Bett leicht wechseln lassen.

Der serienmäßige Handscharter zeigt alle Verstelloptionen des Bettes mit einfachen Piktogrammen an. Seine Tastenreihen lassen sich selektiv sperren. Zur schnellen Herstellung der Kopftieflage steht ein separater Trendelenburg-Handscharter zur Verfügung, sodass der Bewohner diese Funktion nicht mit der Fußtieflage verwechseln kann.



▲ Trendelenburg-Handscharter




Steht der Bewohner auf, informiert das System die Pflegekräfte z. B. durch ein Lichtsignal im Flur oder ein Tonsignal im Dienstzimmer.

e-help

Digitale Assistenzsysteme

Digitale Assistenzsysteme sind eine moderne Lösung, um freiheitsentziehende Maßnahmen zu reduzieren, Bewohner zu schützen und zugleich die Pflegekräfte vor allem während des Nachtdienstes zu unterstützen. Unter dem Namen „e-help“ entwickelt Stieglmeyer diese Systeme stetig weiter.

Im Zentrum steht dabei das **Out-of-Bed-System**. Ein Lastensensor in der Rückenlehne registriert, wenn der Bewohner aufsteht. Das System kann optional sofort zur besseren Orientierung im Dunkeln ein Unterbettlicht oder die Leselampe einschalten. Nach einem festgelegten Zeitintervall informiert es die Pflegekraft über die bestehenden Hausruftanlagen.

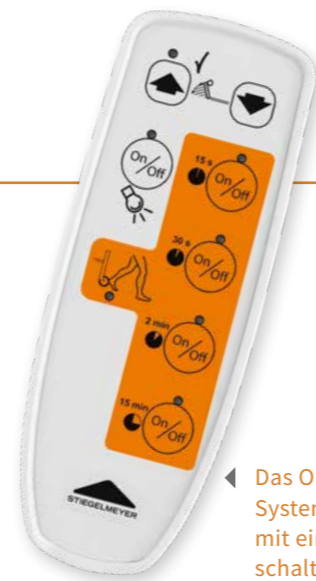

Das Out-of-Bed-System lässt sich mit einem Handschalter sehr leicht bedienen.

ENTSCHEIDEND BESSER

Das Out-of-Bed-System



Der Bewohner verlässt sein Bett und löst damit die Visualisierung durch ein Signal aus

- Orientierung durch optionales Unterbettlicht
- erheblich reduziertes Sturzrisiko bei Nacht ohne Fixierungen
- Information der Pflegekraft nach einem festgelegten Zeitintervall zwischen 15 Sekunden und 15 Minuten, dadurch wenige Fehlalarme direkt nach dem Aufstehen
- schnelle Unterstützung für sturzgefährdete Bewohner



Die Visualisierung im Pflegezimmer



Die Visualisierung im Flur



Ein visueller und akustischer Hinweis im Pflegezimmer wird aktiviert



Ableitstrommessung nur alle 10 Jahre

24-Volt-System

Der sichere und sparsame Antrieb

Hohe Sicherheit, deutlich gesenkte Energiekosten und ein Betrieb mit wenig Aufwand: Das optionale 24-Volt-System ist für alle Elvido-Betten mit elektrischem Antrieb eine attraktive Wahl.


Direkt an der Steckdose stellt ein Netzstecker-Trafo eine **Schutzkleinspannung** von 24 Volt her. Keine spannungsführende 230-Volt-Komponente befindet sich mehr in der Nähe des Pflegebedürftigen, der dadurch eine erhöhte Sicherheit genießt.

Wir haben den Stromverbrauch des 24-Volt-Systems mit dem eines herkömmlichen Antriebs in verschiedenen Belastungsszenarien verglichen. Dabei war das 24-Volt-System in allen Fällen deutlich sparsamer – es verbrauchte bis zu **93 % weniger Strom**. Selbst wenn die Betten nur sehr selten elektrisch verstellt werden, zeigt sich dieser Effekt, denn entscheidend ist der geringere Verbrauch im Stand-by-Modus.

Noch mehr Kosten und Aufwand spart die deutliche Reduktion der **Ableitstrommessungen**. Diese müssen mit dem 24-Volt-System statt jährlich **nur noch alle 10 Jahre** stattfinden.

ENTSCHEIDEND BESSER

Energieeinsparung

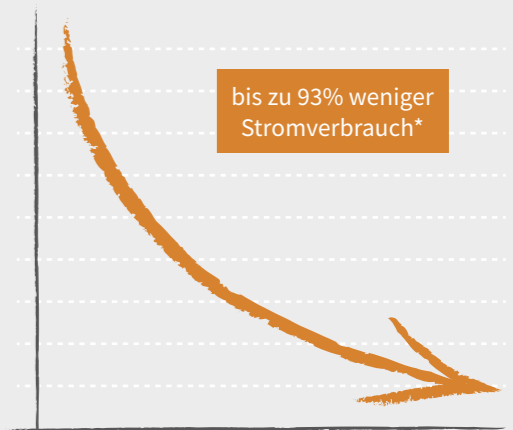


* im Vergleich zu 230-Volt-Systemen bei ca. 5 Verstellungen pro Tag

Ein Netzstecker-Trafo stellt gleich an der Steckdose eine Schutzkleinspannung her. Der optionale Wandabstandshalter am Bett schützt Steckdosen, Wände und Inventar.

ENTSCHEIDEND BESSER

Starke Vorteile

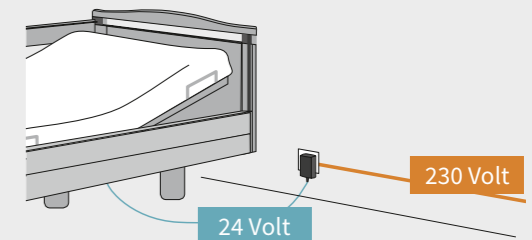

- Schutzkleinspannung ab Trafo an der Steckdose
- keine 230-Volt-Komponenten am Bett
- optional erhältlicher Akku macht das Pflegebett im Notfall unabhängig vom Stromnetz

Im Überblick

- bis zu 93 % weniger Stromverbrauch
- durch den TÜV Rheinland geprüft
- Ableitstrommessung nur alle 10 Jahre
- hohe Sicherheit für Bewohner
- Elektromog am Bett gemindert



Zubehör

So wird das Venta zum Wunschbett

Optionale Polster und Bezüge an den Bettseiten schützen den Bewohner, erleichtern den Ein- und Ausstieg und vermitteln durch ihre angenehm weiche Haptik ein wohltuendes Gefühl von Geborgenheit.

Eine Umhüllung der Seitensicherung verhindert, dass unruhige Bewohner sich an den Holmen stoßen oder zwischen ihnen durchgreifen. Der **Schaumlederschutzbezug** verkleidet die Seitensicherung vollständig von innen und außen. Es stehen passende Längen für die kopfseitige und die voll ausgezogene Seitensicherung zur Auswahl. Die **aufsteckbaren Schutzpolster** verkleiden die Innenseite der Seitensicherung mit 20 mm starkem Formschaum. Der Bewohner genießt dadurch maximalen Schutz. Die Polster lassen sich mit Klettverschlüssen sicher befestigen. Sie sind für den kopfseitigen und den fußseitigen Teil der Seitensicherung wählbar.

Um dem Bewohner den Ein- und Ausstieg zu erleichtern, lassen sich **Füllpolster** in unterschiedlichen Formen auf den freien Teil der Bettseite stecken. Sie vergrößern die Sitzfläche des Bettes.



▲ Der Schaumlederbezug besteht aus hochwertigem desinfizierbarem Kunstleder und Schaumstoff.



▲ Das Füllpolster erleichtert den Ein- und Ausstieg.



▲ Die hohe Variante des Füllpolsters schont zusätzlich die Seitenblende.



▲ Das Schutzpolster lässt sich einfach von innen auf die Seitensicherung stecken.



▼ Der Wandabstandshalter mit Teller ist ideal für Leichtbauwände.



▲ Die Leseleuchte Solo spendet angenehmes Licht bei geringer Wärmeentwicklung.



▲ Der Aufrichter erleichtert eine bequeme Positionierung im Bett.

Weitere Produkte
finden Sie in unserem
Zubehörprospekt


Mit Original-Zubehör von Stiegele Meyer lässt sich das Venta noch genauer an individuelle Bedürfnisse anpassen. Praktische Details wie **Wandabweisrollen** und **Wandabstandshalter** schützen das Bett und die Zimmereinrichtung vor Kollisionsschäden. Unsere **Leselampen** spenden gemütliches Licht bei nur sehr geringer Wärmeentwicklung. Der **Journalhalter** und die abklappbare **Schreibplatte** lassen sich an den Bettenhäuptern befestigen und helfen bei der Dokumentation der Pflege. So wird jedes Venta zu einem maßgeschneiderten Wunschbett.

◀ Die elegante Leselampe Stella spendet angenehmes Licht.

ENTSCHEIDEND BESSER

Der Abstandshalter

- Wandabstandshalter vermeiden Kollisionsschäden mit Inventar und Steckdosen beim Manövrieren des Bettes

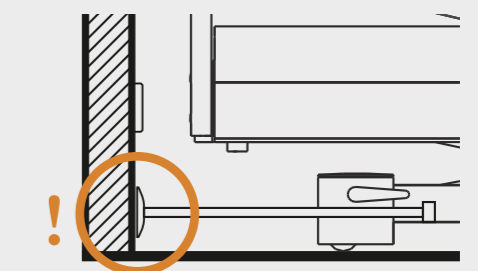

- viele verschiedene Modelle zur Auswahl
- Puffer fängt Stoßenergie auf
- optionaler Teller verteilt Druck noch gleichmäßiger – ideal für Leichtbauwände
- passende Maße für Ihr Bett

Ausstattung und Optionen

Modellvariante	Venta – Standard	Venta – Variante movo	Venta – Variante forto
Maße und Gewichte			
Außenmaße (abhängig vom Holzumbau)	bei Liegeflächenbreite 90 cm ca. 104 × 211 cm	bei Liegeflächenbreite 90 cm ca. 104 × 211 cm	bei Liegeflächenbreite 100 cm ca. 114 × 211 cm
Liegefläche (Matratzenmaß)	90 × 200 cm oder 100 × 200 cm	90 × 200 cm oder 100 × 200 cm	100 × 200 cm
Liegeflächenaufteilung (RL/Sitzteil/OL/UL)	ca. 85 / 15 / 40 / 60 cm	ca. 85 / 15 / 40 / 60 cm	ca. 85 / 15 / 40 / 60 cm
Längenausgleich der Rückenlehne	ca. 10 cm	ca. 10 cm	ca. 10 cm
Sichere Arbeitslast	225 kg	225 kg	260 kg
Unterfahrbarkeit	ca. 15 cm	ca. 15 cm	ca. 15 cm
Gesamtgewicht	ca. 153 kg	ca. 153 kg	ca. 151 kg
Antriebe			
Vollmotorisch	✓	✓	✓
Vollmotorische OpenBus-Technik	✓	✓	✓
24-Volt-Antriebskonzept mit externem Trafo	0	0	0
Elektronische Komponenten			
Handschalter (selektiv sperrbar)	✓	✓	✓
LCD-Handschalter	0	0	0
Out-of-Bed-System	0	0	0
Handschalter für kopfseitige Schwenkung (Trendelenburg)	0	0	0
Seitensicherungssysteme			
schwenkbare Seitensicherung	✓	✓	✓
schwenkbare Seitensicherung inkl. horizontalem Teleskop	0	0	0
Lückenschluss	0	0	0
Verriegelung in abgesenkter Position	0	0	0
Seitensicherungsschutzhöhe	42 cm	42 cm	42 cm
Liegeflächen			
Hygiene-Liegefläche	✓	✓	✓
Komfort-Liegefläche (nicht bei Liegefläche 100 cm)	0	0	-
Liegeflächenbreite 100 cm	0	0	✓
Liegefläche 4-geteilt	✓	✓	✓
Liegefläche in Fußtieflage schwenkbar	✓	✓	✓
Liegefläche in Kopftieflage schwenkbar	0	0	0

Modellvariante	Venta – Standard	Venta – Variante movo	Venta – Variante forto
Rollen			
Laufrollen ø 125 mm	-	-	✓
Doppellaufrollen ø 100 mm	-	✓	-
Doppellaufrollen ø 50 mm	✓	-	-
4-Rollen-Zentralfeststellung	0	✓	✓
2 × 2-Rollenfeststellung	✓	-	-
Wandabweissysteme			
Wandabweissrollen horizontal wirkend	0	0	0
Wandabweissrollen horizontal und vertikal wirkend	0	0	0
Wandabstandshalter am Untergestell	0	0	0
Sonstiges			
Softcover	0	0	0
Lifterunterfahrbarkeit	✓	✓	✓
Aufnahmhülsen kopfseitig	✓	✓	✓
Aufnahmhülsen fußseitig	0	0	0
teleskopierbare Seitenblenden	0	0	0
Bettzeugablage	0	0	0
integrierte Bettverlängerung (20 cm) werkzeuglos ausziehbar	✓	✓	✓
Unterschenkelhennenverlängerung	0	0	0



ENTSCHEIDEND BESSER Venta-Serie – die Sicherheitsstandards

- EN 14971
Risikoanalyse für Medizinprodukte
- EN 60601-1
Sicherheit für medizinisch elektrische Geräte
- EN 60601-1-1
Elektromagnetische Verträglichkeit
- DIN EN 60601-2-52
Medizinische elektrische Geräte

✓ = Standardausstattung
0 = optional erhältlich
- = nicht lieferbar

Wertebewahrer Zukunftsgestalter



STIEGELMEYERGRUPPE

Wertebewahrer

Unser Unternehmen wurde im Jahr 1900 in Herford gegründet und ist bis heute familiengeführt. Respekt und Verantwortung gegenüber unseren Kunden, Mitarbeitern und Partnern sind die Basis unserer täglichen Arbeit. Aufbauend auf diesen Werten sowie unserer langjährigen Erfahrung bieten wir unseren Kunden in aller Welt hochwertige Produkte, Lösungen und Services für die Anforderungen in Pflege und Gesundheit.

Zukunftsgestalter

Um den schnellen Veränderungen im Pflege- und Gesundheitswesen gerecht zu werden, entwickeln wir alle unsere Produkte selbst. Innovationen und Visionen für die Pflege der Zukunft sind das Ziel unserer Arbeit. Dabei stehen wir immer im Austausch mit unseren Kunden, um sie bei ihren Aufgaben im Alltag gezielt zu unterstützen. Die Trends von morgen schon in der Gegenwart umzusetzen, ist bei uns eine erfolgreiche Tradition.

Unsere Expertise

- Krankenhaus
- Pflegeheim
- Pflege zuhause
- Komfortbetten
- Möbelsysteme
- Service



Die Stiegelmeier-Gruppe ist Ihr internationaler Partner für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen und mit der Marke Burmeier für die häusliche Pflege. Wir unterstützen unsere Kunden mit praxisingerechten Produkten, Lösungen und Services, die wir stetig weiterentwickeln.

- 1900 gegründet und bis heute familiengeführt
- über 1.100 Mitarbeiter weltweit
- Fertigung aller Kernprodukte in eigenen Werken
- Produktentwicklung und Produktion in Deutschland
- Service, Schulung und Prozessoptimierung beim Kunden
- internationale Zertifizierungen und Export in mehr als 60 Länder
- Vertriebsgesellschaften in Belgien, Finnland, Frankreich, den Niederlanden, Polen und Südafrika

Unsere Marken





STIEGELMEYERGRUPPE

Hauptsitz / Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax +49 (0) 5221 185 - 252
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com

France
Stieglmeyer SAS
8 Allée des Chevreuils
69380 Lissieu
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
Fax +33 (0) 4 7238 - 5481
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

South Africa
Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd
The Estuaries · Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Nederland / Netherlands
Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland
Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
Fax +358 (0) 3 7536 - 330
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland
Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl



Finden Sie Ihren Ansprechpartner auf unserer Website:
Find your local partner on our website:
www.stieglmeyer.com/partner

stieglmeyer.com